

CLEARsplint®

*MMA-freie Premium
Aufbisssschiene*



Der perfekte Schutz!

astron®



Darstellung Memory-Effekt:



Die verformte Schiene stellt sich bei Körpertemperatur in den Urzustand zurück und bleibt permanent anpassungsfähig. Die gute Oberflächenhärte geht auch unter Wärme nicht verloren.

Qualität und Ästhetik aus Meisterhand - überreicht von:

astron[®] CLEARsplint[®]



Situationsmodell



...mit passgenauem
Aufbisschutz

Vorteile von astron CLEARsplint[®], die für sich sprechen!

- ⇒ die thermoplastische Flexibilität der Schiene ermöglicht eine präzise Anpassung (Memory-Effekt)
- ⇒ ist selbstadjustierend im Mund, wenn sie vor Gebrauch zur Flexibilisierung in warmes Wasser (40-50 °C) gelegt wird
- ⇒ hohe Verträglichkeit – **MMA-frei**
- ⇒ bessere Anpassung ermöglicht höheren und spannungsfreien Tragekomfort - lange tragefähig
- ⇒ durchsichtige und optische Klarheit erlaubt nahezu unbemerktes Tragen
- ⇒ Reparaturen und Ausbesserungen können durchgeführt werden
- ⇒ einfache Hygiene, zur täglichen Reinigung leicht herausnehmbar
- ⇒ hohe Bruchstabilität - optimaler Schutz der Zähne

wichtige Patienteninformation auf der Rückseite ----->



Patienteninformation

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer
astron CLEARsplint® Premium-Aufbissschiene!

Vorteile:

- ➔ absolut präzise Anpassung
- ➔ selbstadjustierend
- ➔ hohe Verträglichkeit, da frei von Methylmethacrylat (MMA)
- ➔ hoher und spannungsfreier Tragekomfort. Kein Druckgefühl im Mund
- ➔ vergilbt nicht, da frei von Aminen
- ➔ reparaturfähig

Pflegehinweise:

- ➔ Bitte reinigen Sie Ihre Aufbissschiene nach jedem Tragen mit DuraClean² Spezialreiniger
- ➔ **Prothesenreiniger dürfen NICHT verwendet werden!**
- ➔ Legen Sie Ihre Schiene vor dem Einsetzen in den Mund unbedingt immer in warmes Wasser (40-50 °C).
- ➔ Die Aufbissschiene vor extremer Hitze bzw. Kälte schützen.

Spezialreiniger für CLEARsplint® Aufbissschienen

DuraClean²



Sparsam im Gebrauch – reicht für 48 Anwendungen

Reiniger (170 g) mit Behälter und Bürste	REF 26170S
Reinigungsmittel - Dose mit 170 g	REF 26171
Reinigungsbürste	REF 26172
Reinigungsbehälter	REF 26173

Vertrieb:

KENTZLER-KASCHNER DENTAL GmbH
Mühlgraben 36
73479 Ellwangen/Jagst
Telefon: +49 (7961) 90 73-0
Fax: +49 (7961) - 5 20 31
info@kkd-topdent.de
www.kkd-topdent.de



Astron Dental Corp.
Lake Zurich, Ill. 60047
Made in USA

**KENTZLER
KASCHNER
DENTAL**

M2 60396/29.01.2014